


GENERADOR DE OXÍGENO OxyGeni® y APÓSITO DE ESPUMA ABSORBENTE OxySpur®, ADHESIVO y NO ADHESIVO, para DIFUSIÓN CONTINUA de la OXIGENOTERAPIA

INSTRUCCIONES DE USO

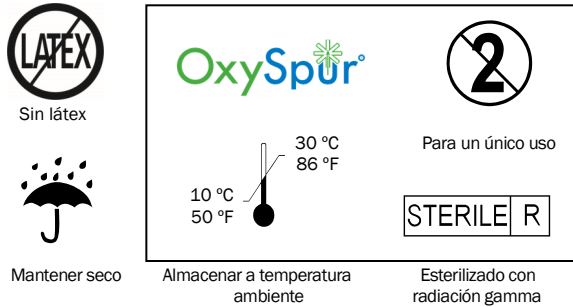

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema OxyGeni consta del generador de oxígeno OxyGeni, los juegos de extensión de administración de oxígeno, el cargador USB, la unidad de alimentación OxyGeni, el estuche de transporte y los apósitos de difusión de oxígeno OxySpur. Están disponibles paquetes humidificantes opcionales para usarse en entornos de baja humedad.

El generador de oxígeno OxyGeni utiliza tecnología de pila de combustible para producir de forma continua oxígeno. Es recargable y se debe recargar a diario. El oxígeno puro y humidificado fluye del puerto de O2 a través del juego de extensión de administración de oxígeno hasta el apósito de difusión de oxígeno OxySpur.

El apósito de difusión de oxígeno OxySpur es un apósito hidrófilo diseñado para usarse con el dispositivo de oxigenación de tejidos OxyGeni en el tratamiento de las heridas. El apósito está disponible en dos formas: OxySpur para heridas con un nivel de exudado de medio a alto y OxySpur LITE para heridas con un exudado de bajo a mínimo.

El apósito OxySpur es una estructura multicapa con una capa de espuma hidrófila altamente absorbente que va en contacto directo con las heridas, una capa de espuma hidrófila altamente absorbente con canales para la distribución de oxígeno y una lámina polimérica superabsorbente, todos cubiertos por una película oclusiva. La versión adhesiva también incluye un borde adhesivo hidrocólicoide. Todas las versiones contienen una cánula de administración de oxígeno integrada que suministra oxígeno en la capa de espuma de distribución de oxígeno. La capa superabsorbente convierte los líquidos de la herida en un gel, absorbiendo y reteniendo el líquido para apartarlo de la capa de espuma en contacto con la herida, manteniendo así un nivel de humedad con un equilibrio óptimo en la capa en contacto con la herida durante un período prolongado.

OxySpur LITE difiere en que tiene una capa de malla no adherente directamente adyacente a la herida, una capa de espuma hidrófila aunque menos absorbente que está cubierta por una película oclusiva, y un borde adhesivo. OxySpur LITE está pensado para usarse en heridas con un exudado de mínimo a bajo, como en una etapa avanzada del ciclo de cicatrización, cuando los niveles de exudado de la herida disminuyen.

Un objetivo de la oxigenoterapia es proporcionar un suministro de oxígeno ininterrumpido y continuo para mantener la herida húmeda. El apósito está diseñado de modo que el oxígeno se suministre de un modo que se aproxime lo más posible a la difusión normal del oxígeno en los tejidos húmedos, aunque a una tasa suficiente para satisfacer las mayores demandas de oxígeno que resultan necesarias en los tejidos que están cicatrizando. Este tratamiento se conoce como terapia de difusión continua de oxígeno (Continuous Diffusion of Oxygen, CDO). El apósito ayuda a proporcionar un entorno que permita una cicatrización óptima de la herida al proporcionar la terapia CDO al tiempo que se controlan los niveles de exudado de la herida, protegiéndola de la deshidratación y de la contaminación externa.

OxySpur está disponible con o sin un borde adhesivo. OxySpur LITE solo está disponible con un borde adhesivo. Ambas versiones se mencionan en este documento simplemente como OxySpur.

INDICACIONES

La terapia CDO está diseñada para pacientes que se beneficiarían de la oxigenación de la herida, dado que puede promover la cicatrización de la herida a través de una mayor producción de colágeno, angiogénesis, generación de especies reactivas del oxígeno y un incremento del metabolismo celular. El sistema OxyGeni está indicado para tratar tipos de heridas que incluyen:

- Úlceras cutáneas provocadas por:
 - diabetes
 - insuficiencia venosa
 - infecciones postquirúrgicas
 - lesiones gangrenosas
- Úlceras de decúbito
- Extremidades residuales infectadas
- Injertos cutáneos
- Quemaduras
- Congelación

Dado que los apósitos pueden absorber y retener el líquido bajo presión, son adecuados para usarse bajo compresión. Los apósitos pueden usarse para proporcionar un control de la humedad y protección a lo largo de todo el proceso de cicatrización.

Aunque OxySpur puede usarse en heridas con exudado abundante, el nivel de exudado determinará el tiempo de uso eficaz del apósito y la herida se debe monitorear en consonancia.

CONTRAINDICACIONES

El sistema OxyGeni está contraindicado para lo siguiente:

- Heridas con una perfusión inadecuada para respaldar la cicatrización
- Úlceras debidas a tromboflebitis agudas
- Úlceras debidas a la enfermedad de Raynaud
- Heridas necróticas cubiertas con escaras o costras
- Heridas con fistulas o trayectos fistulosos profundos con una profundidad desconocida

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

PRECAUCIÓN: Está garantizada la esterilidad del apósito salvo que la bolsa esté dañada o abierta antes de usarse. NO utilice si ha ocurrido algo de lo anterior.

- Se puede producir un aumento importante del exudado durante la fase temprana de la terapia CDO, generando la necesidad de una evaluación y cambios de apósitos más frecuentes. Para reducir la frecuencia de los cambios de apósitos, puede añadir apósitos absorbentes bajo el apósito OxySpur
- Los apósitos estériles están indicados para un solo uso
- No utilice pasada la fecha de caducidad
- En caso de intolerancia al apósito, retire y limpie la zona con cuidado
- Durante el proceso de cicatrización natural del cuerpo, el edema puede disminuir y se puede eliminar tejido no viable de la herida (desbridamiento autolítico), lo que inicialmente podría hacer que la herida parezca más grande
- Si la herida sigue creciendo después del cambio de los primeros apósitos, consulte a un profesional de la salud
- Es importante que los materiales oclusivos, como los apósitos de película o productos a base de aceite (como la vaselina, los bálsamos o las pomadas), no se apliquen sobre el lecho de la herida bajo el apósito OxySpur, dado que esto afectará al rendimiento de la CDO
- El apósito OxySpur tiene una película oclusiva en un lado (el lado con burbujas) y debe tener cuidado de aplicar el apósito de forma que la película oclusiva quede en sentido contrario a la herida, sin contacto con la superficie de la herida, dado que esto afectará al rendimiento de la CDO
- Deben tomarse medidas de apoyo adecuadas cuando sea necesario (p. ej., uso de compresión en el tratamiento de las úlceras varicosas de las piernas o medidas de redistribución de la presión en el tratamiento de las úlceras de decúbito, antibióticos sistémicos y monitoreo frecuente en el tratamiento de la infección de la herida, control de la glucosa en sangre y descarga para las úlceras diabéticas, etc.)
- La herida se debe evaluar durante los cambios de apósito
- Al ducharse el OxyGeni se debe desconectar del apósito: asegúrese de que el apósito y el extremo del tubo conectado al apósito estén protegidos, de modo que el agua no se introduzca en la parte superior del tubo ni el apósito
- No retire el OxyGeni
- No corte el tubo ni tire del tubo
- No conecte un bifurcador en Y al tubo, dado que esto puede afectar al rendimiento de la CDO
- El OxyGeni se puede cargar utilizando cualquier otro cargador USB distinto del suministrado con el sistema
- Asegúrese siempre de que el apósito esté colocado en posición central sobre la herida: el tubo del apósito debe estar colocado apuntando hacia arriba (en dirección a la cabeza) sobre piel intacta y no debe extenderse sobre la herida, de modo que se minimice el riesgo de acumulación de líquido alrededor del tubo y el posible bloqueo del flujo de oxígeno
- Las TC y las radiografías tienen el potencial de interferir con algunos dispositivos médicos electrónicos: cuando sea posible, saque el OxyGeni fuera del rango de la radiografía o el escáner: si el OxyGeni ha quedado dentro del rango de la TC o la radiografía, compruebe que funcione correctamente después del procedimiento
- Este OxyGeni es un dispositivo para un solo paciente: la utilización de cualquier parte de este sistema en más de un paciente puede provocar contaminación cruzada que puede generar infecciones
- Las temperaturas y la humedad elevadas pueden reducir los tiempos de deterioro de los apósitos
- Consulte a un profesional de la salud si se presentan: signos de infección (aumento del dolor, mayor enrojecimiento, supuración de la herida); sangrado excesivo; un cambio imprevisto en el color y/o el olor de la herida; irritación (aumento del enrojecimiento y/o la inflamación); sensibilidad (reacción alérgica); ausencia de signos de cicatrización
- Estas instrucciones no pretenden reemplazar a las instrucciones de su profesional de atención médica
- Si tiene preguntas adicionales sobre su sistema OxyGeni, llame a su proveedor local de cuidado de las heridas

- Si tiene preguntas o preocupaciones médicas urgentes, llame al médico o cuidador clínico
- Informe cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el sistema OxyGeni a EO₂ Concepts y a la autoridad con jurisdicción en su región.
- La legislación federal (EE. UU.) restringe la venta o alquiler de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa

INDICACIONES DE USO

Configuración del sistema

- Asegúrese de que todos estos elementos estén disponibles para completar la configuración de su sistema:
 - Generador de oxígeno y dispositivo de monitoreo de heridas OxyGeni
 - Juego de extensión de administración de oxígeno OxyGeni (tubo de conexión)
 - Apósito OxySpur (el tamaño del apósito lo determinará su cuidador clínico)
- Elementos opcionales:
 - Unidad de alimentación OxyGeni
 - Estuche de transporte OxyGeni
 - Paquete humidificante OxyGeni
 - Producto de preparación de la piel
 - Media o vendaje de compresión
 - Película fijadora
 - Alginato u otros materiales de relleno hidrófilos

APLICACIÓN DEL APÓSITO OxySpur

Antes de la aplicación:

- Limpie la zona de la herida.
- Desbride la herida de tejido desvitalizado (las escaras, costras, etc. pueden interferir con la administración de oxígeno)
- Seleccione un apósito que permita que la zona de contacto con la herida cubra por completo la herida y se extienda sobre tejido sano
- Utilice protección cutánea antes de aplicar un apósito adhesivo

NOTA: No utilice productos a base de aceite, como vaselina, bálsamos o pomadas: no permiten que el oxígeno penetre y afectarán a la eficacia de la terapia CDO. Los geles y las cremas habitualmente están hechos a base de agua y funcionan bien con la CDO.

Aplicación de apósitos OxySpur adhesivos:

NOTA: Debería utilizarse un protector cutáneo antes de colocar el apósito adhesivo. Si le preocupa la piel del paciente no tolere un adhesivo fuerte, le aconsejamos que utilice un apósito sin adhesivo.

- Los adhesivos hidrocólicos funcionan con más eficacia cuando están calientes. Caliente la parte del adhesivo con las manos antes de aplicar el producto. Retire el protector transparente para exponer la parte adhesiva (hidrocólicoide) del apósito
- Oriente el apósito de tal forma que el tubo que salga del apósito quede orientado hacia arriba cuando el paciente esté de pie o en reposo. Esto ayudará a evitar que entre exudado en el tubo cuando el paciente retire el OxyGeni para ducharse o bañarse
- Coloque y alise en su sitio (el lado de las burbujas hacia arriba) mientras retira la segunda mitad del protector de plástico transparente
- Alise con cuidado la zona del borde del apósito para asegurar un buen contacto entre el borde de película adhesiva y la piel periferica
- Aplique presión brevemente al adhesivo hasta que se fije firmemente a la piel (active los hidrocólicos con calor y presión)

NOTA: Los bordes adhesivos están diseñados para ser lo suficientemente fuertes como para mantenerse en el paciente hasta el siguiente cambio de apósito. *Adverta a los pacientes que deben abstenerse de levantar o retirar el apósito entre cambios, salvo que un cuidador clínico les indique lo contrario.* Puede que sea necesario un eliminador de adhesivo al retirar el apósito.

Aplicación de apósitos OxySpur no adhesivos:

NOTA: Debe utilizarse un protector cutáneo antes de colocar el apósito para proteger la periferia de la maceración.

- Oriente el apósito de tal forma que el tubo que salga del apósito quede orientado hacia arriba cuando el paciente esté de pie o en reposo. Esto ayudará a evitar que entre exudado en el tubo cuando el paciente retire el OxyGeni para ducharse o bañarse
- Coloque el apósito sobre la herida. *Asegúrese de que el lado de espuma quede hacia abajo en contacto con la herida (El lado con la impresión de burbujas debe quedar hacia afuera)*
- Debe aplicarse un apósito de película secundario, cinta adhesiva, envoltura o vendaje elástico sobre el apósito OxySpur para asegurar que el apósito permanezca en su sitio
- En caso necesario, el apósito se puede cortar, aunque tenga en cuenta que esto puede aumentar el riesgo de deslaminación del producto
- En el caso de heridas con exudado abundante, no deje de asegurar cualquier fijador sobre todos los bordes del apósito

NOTA: Debe aplicarse una ligera presión sobre todo el apósito para garantizar que el apósito entre en contacto con la superficie de la herida. Esto permite la absorción del exceso de líquido del lecho de la herida por el apósito y puede lograrse utilizando una envoltura o una media. *Todos los apósitos son adecuados para usarlos con compresión, desde medias de compresión ligera a envolturas de compresión de 4 capas.*

NOTA: El sellado alrededor de los bordes del apósito no tiene que ser perfecto, aunque los huecos o los desgarros podrían permitir que el exudado dañe la periferia y reducir potencialmente la concentración de oxígeno en el lugar de la herida. Un sellado demasiado hermético puede provocar una alarma de bloqueo con el paso del tiempo (si se produce más oxígeno que el que consume la herida, la presión del oxígeno se acumulará en un espacio herméticamente confinado).

- Debe advertirse a los pacientes de que eviten levantar o retirar el apósito entre cambios, salvo que se lo indique un cuidador clínico. Asegúrese de que los bordes estén firmemente sellados. Los huecos o los desgarros podrían permitir que el exceso de exudado dañe la periferia y

reducir potencialmente la concentración de oxígeno en el lugar de la herida, lo que podría afectar a la eficacia de la terapia

COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA CÁNULA OxySpur

Para obtener videos de instrucción, visite nuestro [canal de YouTube](#): busque "E02 Concepts" en YouTube.com.

Oriente el apósito OxySpur de tal forma que el tubo quede en la parte superior/orientado hacia arriba a medida que sale del apósito, cuando el paciente esté de pie o en reposo. Esto ayudará a evitar que entre exudado en el tubo cuando el paciente retire el OxyGeni para ducharse o bañarse. El Luer lock debe ser accesible para conectarlo o desconectarlo.

NOTA: La cánula se debe asegurar con cinta adhesiva para reducir la presión que puede generar el dispositivo.

CONEXIÓN DEL APÓSITO OxySpur AL OXÍGENO

- Conecte el apósito al juego de extensión insertando la conexión Luer macho al juego de extensión en el extremo hembra de la cánula del apósito OxySpur y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté segura (aproximadamente ¼ de giro)
- Para asegurarse de que no se retire la cánula del apósito, se recomienda hacer un bucle en espiral y asegurarlo en la parte superior del apósito o junto al apósito
- Dirija el juego de extensión por dentro de la ropa y fíjelo a piel intacta con cinta adhesiva quirúrgica. Asegure para permitir que el tubo tenga libertad de movimiento
- Conecte el extremo del Luer hembra del juego de extensión al puerto macho rotulado con "O2" en el lado superior derecho del OxyGeni introduciéndolo y girándolo en el sentido de las agujas del reloj (aproximadamente ¼ de giro)

NOTA: Asegúrese de que todas las conexiones sean firmes, de modo que no haya fugas de oxígeno.

ENCENDIDO DEL OxyGeni

- Encienda el OxyGeni pulsando el interruptor de encendido del lateral con el símbolo "☺".
- El interruptor de encendido se encuentra en la parte superior del OxyGeni
- Tras el encendido, todas las luces y segmentos de LCD se encenderán brevemente para confirmar un funcionamiento normal. El indicador acústico también sonará brevemente

NOTA: El OxyGeni siempre se debe dejar en la posición de "encendido" hasta que se complete el ciclo de tratamiento y se devuelva el OxyGeni.

- El OxyGeni comenzará el proceso de autocalibración, durante el que la pantalla LCD mostrará "CA"
- Tras completar la autocalibración (aproximadamente 3 minutos), el caudal de oxígeno se mostrará en la pantalla LCD. El cuidador clínico ajusta el caudal de oxígeno y es el único que puede cambiarlo.
- NOTA: El caudal de oxígeno cambiará ocasionalmente a medida que el OxyGeni realice ajustes para adaptarse a las variaciones medioambientales. Es normal. Si el OxyGeni está fluyendo a un caudal inferior al configurado durante más de 30 minutos, continúe con la terapia y póngase en contacto con su cuidador.
- La luz verde de "System OK" (Sistema correcto) se encuentra justo debajo de la pantalla LCD e indica que el OxyGeni está funcionando adecuadamente. Consulte las secciones de Funciones y Solución de problemas para obtener más información sobre las funciones del OxyGeni y cómo solucionar problemas del sistema, respectivamente

CAMBIOS DEL APÓSITO

- La frecuencia de los cambios del apósito depende de múltiples factores, incluido el estado de la herida, el nivel de exudado, etc. Los cambios del apósito se deben realizar una vez que el efecto de tachado (el exudado de la herida alcanza la parte superior y el borde del apósito) resulta evidente o, como mínimo, una vez a la semana.
- Para aplicar un nuevo apósito, siga las instrucciones y precauciones que se indican en la sección "Aplicación del apósito OxySpur".

Retirada del apósito OxySpur adhesivo:

- Se recomienda mantener los apósitos adhesivos OxySpur durante, al menos, 3 días y no más de 7 días
- Desconecte la cánula del apósito OxySpur del juego de extensión o del OxyGeni con un giro en sentido contrario a las agujas del reloj
- Para retirar el borde adhesivo, recomendamos usar un eliminador de adhesivo de uso médico. Utilice la almohadilla eliminadora para levantar suavemente una esquina del borde adhesivo del apósito OxySpur
- Una vez que se haya tirado hacia arriba suavemente de la esquina, utilice la almohadilla bajo el apósito para ayudar a eliminar el adhesivo, soltándolo lentamente de la piel
- Utilizando una franja lateral y el eliminador de adhesivo médico, alterne entre tirar del apósito OxySpur y eliminar el adhesivo, hasta que el apósito se haya retirado por completo de la piel

Retirada del apósito OxySpur no adhesivo:

- Desconecte la cánula del apósito OxySpur del juego de extensión o del OxyGeni con un giro en sentido contrario a las agujas del reloj. Levante suavemente las esquinas de los apósitos de la herida y retire y elimine el apósito como haría con cualquier apósito

NOTA: Si encuentra dificultades para retirar el apósito, debe irrigarlo con solución salina estéril o una solución similar.

FUNCIONES DE OxyGeni

- Flujo de O2 – la pantalla LCD indica el caudal de oxígeno, que se muestra en mililitros por hora (ml/h). El caudal mostrado puede variar según el OxyGeni realice ajustes para adaptarse a los cambios en el entorno
- Indicador de SYSTEM OK (SISTEMA CORRECTO) - la luz verde indica que el OxyGeni está funcionando normalmente cuando se enciende

- Indicador de BLOCKAGE (BLOQUEO) - la luz roja indica que hay un bloqueo cuando se enciende. Se emitirá una alarma. Consulte la sección de Alarma de bloqueo de las instrucciones para obtener más información
- Botón SET (AJUSTAR) – este botón no tiene ningún efecto. Lo utiliza el cuidador clínico para ajustar el caudal de oxígeno, aunque no responde durante el funcionamiento normal
- Botones +O2, -O2 – estos botones no tienen ningún efecto. Los utiliza el cuidador clínico para ajustar el caudal de oxígeno, aunque no responden durante el funcionamiento normal
- MUTE (SILENCIAR) – silenciar este botón silenciará temporalmente las alarmas
- Indicadores de carga de BATTERY (BATERÍA) – estas luces muestran la carga restante aproximada del modo siguiente (de izquierda a derecha en el OxyGeni):

● ● ● ● ●
100 - 85 % 85 - 65 % 65 - 45 % 45 - 25 % 25 - 0 %

- Primera luz verde (extremo izquierdo) al menos un 85 % restante (18-24 horas)
- Segunda luz verde al menos un 65 % restante (15-18 horas)
- Tercera luz verde (medio) al menos un 45 % restante (10-15 horas)
- Cuarta luz verde al menos un 25 % restante (6-10 horas)
- Luz ámbar (extremo derecho) menos de un 25 % restante (menos de 6 horas)

BATERÍA Y CARGA

Conecte un extremo del cable de carga magnético al puerto de carga en la parte superior de la unidad de alimentación OxyGeni y el otro extremo de dicho cable al puerto de carga de la batería rotulado "⚡" en la parte superior del OxyGeni. El LED de carga se debería poner rojo para indicar que se está cargando la batería. Una vez que la luz de carga se ponga verde, la batería se habrá cargado por completo y el cable de carga magnético puede ser retirado del puerto de carga de la batería OxyGeni.

NOTA: Si la batería interna de OxyGeni está agotada por completo cuando se aplica la unidad de alimentación OxyGeni, el LED de carga parpadeará en color rojo hasta que se alcance una carga suficiente. Luego el LED de carga pasará a ser de color rojo fijo.

Las luces del nivel de batería de la parte delantera del OxyGeni empezarán a parpadear en secuencia durante el ciclo de carga.

Tras la retirada de la unidad de alimentación OxyGeni y del cable de carga magnético al finalizar la carga, las luces del nivel de batería seguirán realizando el ciclo durante unos segundos, luego se detendrán en el nivel de batería obtenido.

Cuando la carga se complete, conecte la unidad de alimentación OxyGeni al cargador USB suministrado, de modo que se mantenga una carga completa.

Dependiendo del caudal y de las condiciones medioambientales, una batería cargada por completo debería estar en funcionamiento durante entre 14 y 18 horas, antes de alcanzar el estado de la cuarta luz verde, que inicialmente indica que queda un 25 % de carga (otras 6 - 10 horas). Cuando la cuarta luz verde se ilumina, las letras BAT se mostrarán en la pantalla LCD y sonará un alarma audible una vez.

Cuando la cuarta luz ámbar (última) se ilumina en el OxyGeni, las letras BAT se mostrarán en la pantalla LCD y sonará un alarma audible una vez. El LED "OK" empezará a parpadear. Debe cargar su OxyGeni lo antes posible.

Deje siempre encendido el OxyGeni, incluso cuando se esté cargando.

NOTA: Si está experimentando problemas de carga, retire por completo la unidad de alimentación OxyGeni y el cable de carga magnético del OxyGeni, espere al menos 30 segundos, luego conecte de nuevo la unidad de alimentación OxyGeni a través del cable de carga magnético al OxyGeni. La luz de carga se debería poner roja, para indicar que el OxyGeni se está cargando.

NOTA: Si la batería interna se agota por completo, el OxyGeni se apagará y dejará de producir oxígeno. Esto interrumpirá la terapia CDO y reducirá la eficacia de su tratamiento, aunque no supone un problema urgente. Cargue el OxyGeni lo antes posible. Mientras tanto, seguirá recibiendo una terapia de herida húmeda.

Especificación de la unidad de alimentación OxyGeni:
Unidad de alimentación: 5000 mAh 5 VCC
Especificaciones del cargador USB:
Modelo 200151
Entrada: 100 – 240 VCA, 50-60 Hz máx. 0,2 A
Salida: 1,0 A – 5 VCC

ALARMA DE BLOQUEO

Cuando se produce un bloqueo:

- La luz roja de "Blockage" (Bloqueo) se iluminará
- Se escuchará una alarma
- La alarma sonará hasta que se pulse el botón "Mute" (Silenciar) o hasta que se elimine el bloqueo

Solución del problema de bloqueo

- Mientras trata de localizar el bloqueo, puede silenciar la alarma sonora pulsando el botón MUTE (SILENCIAR)
- Inspeccione la cánula de administración de oxígeno empezando por la conexión con el OxyGeni. Asegúrese de que no haya acodamientos ni objetos construyendo el tubo que posiblemente bloqueen el flujo de oxígeno a la herida
- Si no hay indicaciones visuales de lo que podría causar un bloqueo y la luz ROJA de bloqueo sigue iluminada, el bloqueo podría estar en el lugar de la herida, bajo el apósito
- Tire suavemente de la cánula, tratando de recolocar el tubo dentro de la herida.

- Si el OxyGeni sigue emitiendo la alarma o alarmas tras ponerlas en silencio, cambie el apósito OxySpur
- Si continúa el bloqueo, llame a su proveedor local de cuidado de las heridas para que le ofrezca más soluciones del problema

CUIDADOS Y MANIPULACIÓN

Evite la exposición directa al agua del OxyGeni y los apósitos OxySpur. El OxyGeni incluye componentes sensibles. No deje caer, desmonte, caliente en microondas, queme, pinte ni inserte objetos extraños.

El OxyGeni está diseñado para operar normalmente a entre -25 °C y +55 °C (entre 13 °F y 131 °F) y una humedad relativa del 15 % al 95 %, sin condensación. Evite cambios drásticos en la temperatura o la humedad, dado que puede formarse condensación en el OxyGeni o dentro de este. Los niveles de humedad por encima de un 35 % de humedad relativa son necesarios para un funcionamiento óptimo del OxyGeni. En el caso de unos niveles de humedad por debajo del 35 %, utilice el paquete humidificante en combinación con el estuche de transporte para aumentar el nivel de humedad en torno al OxyGeni y asegurar un funcionamiento óptimo.

OxySpur: Conserve a temperatura ambiente: 10 – 30 °C (50 – 86 °F). Mantenga seco.

El OxyGeni y el cargador USB están indicados para reutilizarse. Tras completarse el tratamiento y antes de usar el dispositivo en un paciente diferente, el OxyGeni y el cargador USB se deben limpiar a fondo y someterse a una desinfección de nivel intermedio o bajo, dependiendo de la naturaleza y alcance de la contaminación, por parte de un profesional de la salud. Los apósitos y accesorios, incluidos el tubo de extensión, los paquetes humidificantes y los estuches de transporte, etc., son para un solo uso y no se pueden reutilizar tras completar el uso en un paciente, dada la dificultad para limpiar y descontaminar estos productos.

Si se necesita más información u orientación, visite nuestro sitio web (www.eo2.com) o contacte con E02 para obtener asistencia en el: (800) 825-2979

E02, E02 Concepts, OxyGeni y OxySpur son marcas comerciales registradas de E02 Concepts.

© 2020 E02 Concepts®



Fabricado por:
E02 Concepts®
12500 Network Blvd., Suite 310
San Antonio, TX 78249
Estados Unidos de América
www.eo2.com



Representante autorizado:
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haya
Países Bajos



CRF 22-0004
DWG 500006(ES)-02

